

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CHYTRÝ ČISTIČ UŠÍ S HD KAMEROU + PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Přečtěte si prosím tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Čistá hmotnost | 13 g |
| • Rozměry produktu | 145 × 13 × 11 mm |
| • Síťový standard | IEEE 802.11 b/g/n |
| • Anténa | Vestavěná |
| • Pracovní frekvence | 2,4 GHz |
| • Přenosová rychlost | 30 fps |
| • Obrazový snímač | CMOS |
| • Provozní teplota | −10 °C až 50 °C |
| • Kapacita baterie | 130 mAh |
| • Výdrž baterie | cca 35 minut |
| • Doba nabíjení | cca 60 minut |
| • Vstupní proud | DC 5V / 150 mA |
| • Vnitřní průměr čočky | 3,6 mm |
| • Ohnisková vzdálenost | 15–20 mm |
| • Rozlišení | HD |
| • G-senzor | 3osý |



OBSAH BALENÍ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • 1x Otoskop s kamerou | • 1x Sada 7 ocelových nástrojů na hygienu uší |
| • 1x USB napájecí kabel | • 1x Čistící kartáček na nářadí |
| • 4x Vyměnitelné lžičky + nádobka | |

NÁVOD K INSTALACI

Naskenujte QR kód zobrazený níže a stáhněte si aplikaci. Po dokončení instalace se na obrazovce vašeho mobilního telefonu zobrazí ikona aplikace vedle QR kódu.



1. Android zařízení



PODRŽTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ STISKNUTÉ PO DOBU 2 SEKUND, DOKUD NEZAČNE MODRÁ KONTROLKA BLIKAT. VÁŠ PŘÍSTROJ JE NYNÍ PŘIPRAVEN K PŘIPOJENÍ K APLIKACI.



KLEPNĚTE NA KRUHOVÉ TLAČÍTKO „START“ A VYHLEDEJTE WI-FI.



VYBERTE WI-FI „HNDEC_XXXXXX“ A PŘIPOJTE PŘÍSTROJ K APLIKACI..



VRAŤTE SE DO APLIKACE A ZAČNĚTE JI POUŽÍVAT. MODRÁ KONTROLKA PŘESTANE BLIKAT A BUDE SVĚTIT NEPŘETRŽITĚ, COŽ ZNAMENÁ, ŽE PŘIPOJENÍ BYLO ÚSPĚŠNÉ.

2. iOS zařízení




PODRŽTE TLAČÍTKO NAPÁJENÍ STISKNUTÉ PO DOBU 2 SEKUND, DOKUD NEZAČNE MODRÁ KONTROLKA BLIKAT. VÁŠ PŘÍSTROJ JE NYNÍ PŘIPRAVEN K PŘIPOJENÍ K APLIKACI.



KLEPNĚTE NA KRUHOVÉ TLAČÍTKO „START“ A VYHLEDEJTE WI-FI.



NEZAPOMEŇTE NECHAT ZAPNUTOU MOŽNOST „WLAN“.

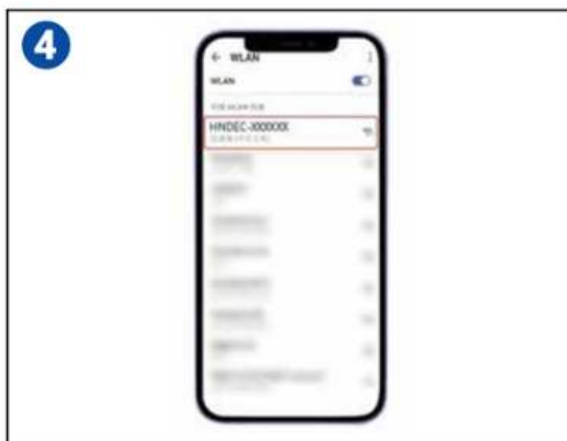


VYBERTE WI-FI „HNDEC_XXXXXX“ A PŘIPOJTE PŘÍSTROJ K APLIKACI..



VRAŤTE SE DO APLIKACE A ZAČNĚTE JI POUŽÍVAT. MODRÁ KONTROLKA PŘESTANE BLIKAT A BUDE SVÍTIT NEPŘETRŽITĚ, COŽ ZNAMENÁ, ŽE PŘIPOJENÍ BYLO ÚSPĚŠNÉ.

PŘEDSTAVENÍ FUNKCÍ

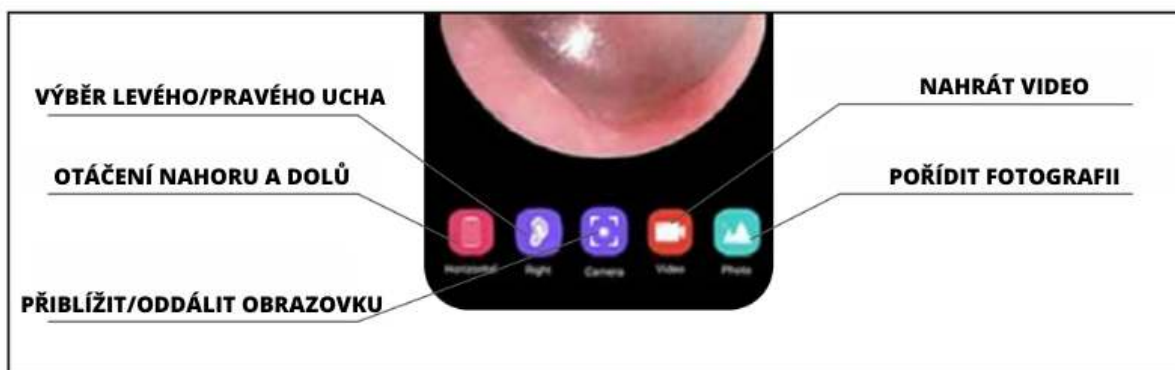

POUŽITÍ

1. Nasadíte silikonový nástavec pevně na kovovou špičku.
2. Pomalu vložte sondu do ucha jen několik milimetrů.
3. Sledujte obraz na mobilu.
4. Pohybujte nástavcem jemně, bez tlaku.
5. Po použití nástavec opláchněte teplou vodou a otřete.

NABÍJENÍ

- Připojte přiložený USB kabel do nabíjecího portu zařízení.
- Druhý konec zapojte do USB adaptéru, powerbanky nebo počítače.
- Během nabíjení svítí kontrolka červeně.
- Po úplném nabití kontrolka změní barvu.
- Doba nabíjení je přibližně 60 minut.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte hluboko v uchu – pouze ve vnější části zvukovodu.
- Nepoužívejte u dětí bez dozoru dospělých.
- Před použitím si vždy zkontrolujte, že je nástavec čistý.
- Nepoužívejte, pokud máte bolest uší, zánět nebo hnisání.
- Nepoužívejte ve vlhku, sprše ani dešti.
- Nepoužívejte, pokud je kamera příliš zahřátá.
- Čistěte pouze měkkým hadříkem, ne alkoholovými ubrousky.
- Ujistěte se, že je hlavice ušního čističe pevně uchycena, aby nedošlo k jejímu uvolnění.
- Je zakázáno používat výrobek na přeplněných místech, kde se pohybují lidé.
- Tento výrobek není vhodný pro děti do 6 let.
- Děti nesmějí tento výrobek používat samy, aby nedošlo k náhodnému zranění.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii. Pokud jej používáte jen zřídka, nabijte jej alespoň jednou za měsíc.
- Během používání se teplota výrobku mírně zvýší (pod 35 °C). Můžete jej používat bez obav.
- Z důvodu bezpečnosti a lepšího uživatelského zážitku používejte výrobek vsedě a udržujte jej v horizontální poloze.
- Tento produkt nečistěte vodou. K čištění čočky použijte alkoholový tampón a postupujte opatrně.

ÚDRŽBA

- Nástavce oplachujte teplou vodou a poté je důkladně vysušte.
- Tělo přístroje neponořujte do vody.
- Kameru čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem.
- Skladujte v suchu, mimo dosah vlhkosti a extrémních teplot.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

? **Aplikace neukazuje obraz**

- Zkontrolujte, zda jsi připojený na Wi-Fi endoskopu.
- Zavřete a znovu otevřete aplikaci.

? **Zařízení se nepřipojuje k Wi-Fi**

- Restartujte endoskop (dlouhý stisk 3s).
- Zapomeňte síť a připojte se znovu.

? ***Obraz je neostrý***

- Očistěte čočku.
- Zkontrolujte, zda je nástavec pevně nasazen.

LIKVIDACE

Nabíjecí baterie v zařízení je nebezpečným odpadem. Nepoužívané nebo vadné zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu, ale po zhodnocení místních předpisů a možností jej zlikvidujte vhodným způsobem (speciální část skládky, sběrný dvůr, sběrný elektronického odpadu).

Vyrobena v Číně



Dodavatel: TechWear s.r.o.
Adresa: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha
E-mail: info@chinasourcing.cz

