

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MULTIFUNKČNÍ MASÁŽNÍ VYHŘÍVANÁ BANDÁŽ



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu! Pro správné používání výrobku je nutné si tento návod přečíst celý a uschovat si jej pro budoucí použití. Pokud by během provozu došlo k jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte.

POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu nebo škodách na majetku. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Ochrana životního prostředí



Dodržujte všechna pravidla a předpisy pro likvidaci odpadu v dané zemi. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat jako domovní odpad.

Zařízení, příslušenství a obal recyklujte.



Je zakázáno vyhazovat výrobek do směsného odpadu.

OBSAH BALENÍ

- 1x masážní bandáž
- 2x fixační pás
- USB-C kabel

SPECIFIKACE




- | | |
|---|--------------------------|
| • Materiál příjemný na dotek, který uvolňuje napětí | • Napětí: 5V |
| • 3 masážní režimy | • Rozměry: 52 cm x 28 cm |
| • 3 režimy ohřevu (40 °C, 50 °C, 60 °C) | • Univerzální |
| • Defaultní pracovní doba: 30 minut | • Zapínání na suchý zip |
| • Výkon: 8 W | • Napájení: USB-C |
| | • Barva: černá |



FUNKCE A VÝHODY

Praktická hřejivá masážní bandáž je perfektní oporou pro ty, kteří se potýkají s bolestmi zad, svalovým napětím nebo stresem. Vestavěný topný modul účinně uvolňuje tělo a ergonomický tvar umožňuje přizpůsobení bandáže zádům, kolenům, ramenům či krku. Ideální pro použití doma, v práci nebo kdekoli při relaxaci.

Integrované tepelné prvky umožňují bandáži dodat teplo přímo do postižené oblasti. Tepelná terapie je známá svou schopností uvolnit svalstvo, zlepšit cirkulaci a urychlit regeneraci tkání.

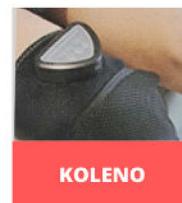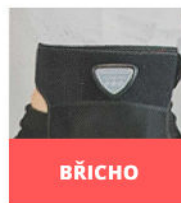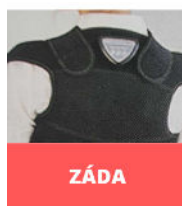

Hlavní výhody bandáže:

- Úleva od bolesti: Pomáhá zmírnit chronickou bolest a napětí ve svalech.
- Zlepšení flexibility: Pravidelné používání může zvýšit flexibilitu svalů a kloubů.
- Podpora regenerace: Urychluje proces hojení po úrazech nebo intenzivním cvičení.
- Pohodlí a jednoduchost: Snadné ovládání a přenosný design umožňuje použití kdykoli a kdekoli.

OVLÁDÁNÍ

- Tlačítko zapnutí/vypnutí (umístěné uprostřed): Stisknutím tlačítka zařízení zapnete a po zapnutí zůstane svítit modré kontrolní světlo; dalším stisknutím a podržením po dobu tří sekund zařízení vypnete.
- Tlačítko vyhřívání: Toto zařízení má tři funkce vyhřívání. Po zapnutí vyhřívání je výchozí nízká úroveň vyhřívání 40 °C.



- Současně bude po dlouhou dobu svítit odpovídající zelené kontrolní světlo. Dvěma stisky se zapne druhý stupeň ohřevu na 50 °C a modré světlo bude svítit po dlouhou dobu. Třemi stisky se zapne třetí stupeň ohřevu na 60 °C a červené světlo bude svítit po dlouhou dobu. Dalším stisknutím vypnete světlo a zastavíte funkci ohřevu.
- Vibrační tlačítko: Tento přístroj má tři vibrační funkce. Vibrační tlačítko aktivuje výchozí vibrace na vysokém stupni a odpovídající zelená kontrolka zůstane svítit. Dvěma stisky se aktivují silné a slabé cyklické vibrace na druhém stupni a modrá

kontrolka zůstane svítit. Třemi stisky se aktivují mírné vibrace a červená kontrolka zůstane svítit. Dalším stisknutím tlačítka se vibrační funkce vypne.

Poznámka: Tento produkt je nabíjecí verzí. Po zapnutí se na prostředním stupni (tlačítko zapnutí/vypnutí) rozsvítí modrá kontrolka. Pokud není dostatek energie, bliká červená kontrolka. Při nabíjení bliká červená kontrolka. Po úplném nabití zůstává červená kontrolka rozsvícená.

**TLAČÍTKO
VIBRACE**
**TLAČÍTKO
ON/OFF**
**TLAČÍTKO
VYHŘÍVÁNÍ**



- Zařízení je nastaveno tak, aby se po 30 minutách provozu automaticky vyplo.

BEZPEČNOST

- Před použitím si přečtěte všechny pokyny. Pokud máte zdravotní potíže, před použitím tohoto produktu se poraďte s lékařem.
- Pacienti se srdečním onemocněním by se před použitím měli poradit s lékařem.
- Nenechávejte děti používat tento produkt bez dozoru.
- Dlouhodobé používání může snadno vést k přehřátí produktu a zkrácení jeho životnosti. Přestaňte produkt používat, dokud nevychladne. Nepoužívejte tento produkt přímo na oteklé, zanícené nebo hnisající oblasti kůže. Produkt není profesionální zařízení a nelze jej používat jako náhradu za lékařskou péči nebo léčbu.
- Osoby s fyzickým postižením, které jim způsobuje potíže s pohybem nebo ochrnutím dolních končetin, nesmějí tento produkt používat. Při používání tohoto produktu musí být přítomni další dospělí.
- Povrch přístroje generuje teplo, a proto by při jeho používání měli být opatrní lidé, kteří jsou citliví na teplo.

